

# Atenschutzmaske richtig anlegen – uvex FFP2 Atemschutz 2210

Beachten Sie, dass es für dieses Modell drei verschiedene Möglichkeiten gibt, die Maske aufzusetzen.

Ein Video zum Anlegen der Atemschutzmaske finden sie unter:

<https://www.uvex-safety.com/de/produkte/atemschutzmasken/ffp2-atemschutz-formmaske-uvex-silv-air-c-2210/>

## Möglichkeit 1, die Maske aufzusetzen



1. Maske mit den Kopfbändern nach unten in die Hände nehmen
2. Mit dem Kinn in die Maske einsteigen, danach über die Nase ziehen
3. Unteres Kopfband im Nacken und oberes Kopfband oberhalb der Ohren platzieren

## Möglichkeit 2, um die Atemschutzmaske anzuziehen



1. Unteres Kopfband in den Nacken legen
2. Mit dem Kinn in die Maske einsteigen, danach über die Nase ziehen
3. Oberes Kopfband oberhalb der Ohren platzieren

## Möglichkeit 3, um die Atemschutzmaske anzuziehen



1. Beide Kopfbänder dehnen und das untere im Nacken platzieren
2. Mit dem Kinn in die Maske einsteigen, danach über die Nase ziehen
3. Oberes Kopfband oberhalb der Ohren platzieren